

Ventilatoren suger varme og fugt ud af Anatomic formstøbt sæde. Man må på ingen måde udsætte ventilator eller batteri for vand (f.eks. ved rengøring). Såfremt det er nødvendigt at rengøre Anatomic formstøbt sæde, kan dette gøres forsigtigt med fugtig klud, så man ikke udsætter den monterede ventilator for vand.

Batteri

Batteriet er opladningsbart og kan oplades med den medfølgende lader. Det må ikke smides i skraldespanden, men skal indleveres til genbrug. Batteriet kan ikke oplades i bilen, kun med den medfølgende lader.

Opladning af batteri

- 1) Tilslut laderen til 230V, 50Hz.
- 2) Tilslut ladekontakten til ventilationshuset.
- 3) Når batteriet tilsluttes blinker laderen langsomt gult for at starte med en langsom opladning. Efter en stund begynder laderen at oplade hurtigt, hvilket indikeres ved at det blinker grønt hurtigt.
- 4) Lad batteriet være tilsluttet til lampen lyser et konstant grønt lys, hvilket indikerer at batteriet er klart.
- 5) Tag ladestikket ud af stikkontakten.
- 6) Tag laderen bort fra ventilationshuset.

Hvis batteriet skulle være dårligt blinker lampen gult hurtigt.

Anvendelse

Kun til opladning indendørs. Udsæt ikke laderen for regn.

Sikring

Der sidder en sikring på undersiden af ventilationshuset.

Du er naturligvis meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.



Batteriet skal afleveres til genbrug på din lokale genbrugsstation, når det er udtjent.