

BEVAR ET GODT PRODUKT OG DERMED EN GOD SIDDESTILLING.

SÅDAN VEDLIGEHOLDER MAN ANATOMIC FORMSTØBT SÆDE:

Vask af indsats/betræk:

Indsatsene håndvaskes ved 40°C. Du kan bruse dem og anvende en blød svamp eller børste med mild sæbe.

Tørring af indsats:

Indsatsene skal tørre ved stuetemperatur. Indsatsene må ikke placeres direkte mod en varmekilde, og de må ikke tørres i tørrerum eller tørretumblere, da det kan medføre at indsatsene mister deres form.

Vask af plasten:

Plastskallen vaskes med svamp eller blød børste. Du kan anvende mildt vaskemiddel eller desinfektionsmiddel, hvis nødvendigt.

Kontrol af slitage og god skik:

Kontrollér regelmæssigt stropperne, specielt ved fastgørelsespunkterne.

Det er en god idé at løsne stropperne til natten og skille indsats 1 og indsats 2 fra hinanden. På den måde kan evt. kondens tørre, og lugtgener minimeres, samtidig med at produktets levetid forlænges.

Har du yderligere spørgsmål til Anatomic formstøbt sæde, er du meget velkommen til at kontakte os.

