

Bevar et godt produkt og dermed en god siddestilling



Sådan vedligeholder man Anatomic formstøbt sæde soft:

Vask af betræk:

Betrækket kan tages af sæde- og rygpude og vaskes ved 60° C. Hvis du skal vaske betrækket, skal du først fjerne skummet fra sædet fra Anatomic formstøbt sæde soft, herefter fjernes skummet i ryggen. Ellers er der risiko for at kropstøttebeslagene ødelægger rygskummet.

Det samme gælder, når betrækket skal påsættes igen. Der sætter man først rygskummet på plads i det formstøbte sæde, og herefter det i sædet.

Denne procedure er for at forhindre skummet ødelægges.

Skal tørre ved stuetemperatur og må ikke placeres direkte opad varmekilde.

Vask af puder:

Skummet aftørres med en fugtig klud med mild sæbe.

Tørring af sæde- og rygpude:

Puderne skal tørre ved stuetemperatur. De må ikke placeres direkte mod en varmekilde, og de må ikke tørres i tørrerum eller tørretumblere.

Vask af plasten:

Plastskallen vaskes med svamp eller blød børste. Man kan anvende mildt vaskemiddel eller desinfektionsmiddel, hvis nødvendigt.

Kontrol af slitage og god skik:

Kontrollér regelmæssigt betrækket og puderne. Det er en god idé at tage hynderne ud af plastdelen om natten. På den måde kan evt. kondens tørre, og lugtgener minimeres, samtidig med at produktets levetid forlænges. Har du yderligere spørgsmål til Anatomic formstøbt sæde soft, er du meget velkommen til at kontakte os.

